 Biotecnoquímica, C.A.	Título		Fechas		Código
	Requisitos para la instalación del equipo Colon Hydroterapia BTQ		Emisión Abril. 2002	Efectiva Mayo 2002	MERC -Gen-015- Rev 0
Departamento	Área	Archivo	Fecha de Revisión	Número de	
Mercadeo	Equipos	Mercadeo	Mayo 2007	Página 1 de 2	

Biotecnoquímica - BiotecnoMédica Venezuela

www.biotecnoquimica.com

La Urbina, Calle 10 con Calle 5 Edf. Walpirema Caracas 1073 Venezuela

Telf. Caracas (0212) 243 58 02, 242 51 52

Fax: (212) 242 76 62

Equipo de Colon Hydroterapia BTQ, Modelo MF 05-F

El equipo de Colónico viene con las siguientes partes:

- Equipo de Colon-Hydroterapia con sistemas de visor, drenaje, llaves reguladoras, mezcladoras y de control, manómetro y termómetro.
- Botella para limpieza y esterilización.
- Soportes para ser fijado el equipo a la pared.
- Sistemas de filtración agua fría, agua caliente.
- 10 Quits desechables para los primeros colónicos.
- Manual de instalación.

Requisitos para la instalación:


El sitio de trabajo con el equipo de Colónico debe poseer un ambiente amplio con una camilla y una pared cercana donde se fijará el equipo. Debe estar colocado a 84 cm del piso considerando que la camilla a usar tiene 80 cm de altura, de manera que el paciente una vez conectado al equipo esté aproximadamente a la misma altura que el desagüe del equipo (Conector donde se coloca la manguera desechable).

Se recomienda una poceta (WC) cercana al lugar del colónico o en la misma habitación, algunos recomiendan una ducha ya que en algunas ocasiones el paciente se ensucia las piernas y de esta forma puede lavarse con comodidad.

Para ser fijado el equipo de colónico a la pared debe usarse un par de piezas que se fijan a la pared con tres tornillos cada una, que servirán de soporte, así el equipo se "colgará" de estos soportes.

Es necesario suministro de agua fría y agua caliente, y un desagüe o salida de aguas negras, lo más bajo posible, máximo a 20 cm de altura del piso. El Colónico trae su propio sifón, el desagüe no lo requiere.

Es conveniente disponer de un calentador de agua de al menos 20 litros. y deberá estar regulada su temperatura a no más de 75°C.

 Biotecnoquímica, C.A.	Título		Fechas		Código
	Requisitos para la instalación del equipo Colon Hydroterapia BTQ		Emisión Abril. 2002	Efectiva Mayo 2002	MERC -Gen-015- Rev 0
Departamento	Área	Archivo	Fecha de Revisión	Número de	
Mercadeo	Equipos	Mercadeo	Mayo 2007	Página 2 de 2	

No es conveniente el uso de calentadores que se activan con el flujo de agua (calentadores a gas), se recomienda calentadores con tanque donde hay almacenada agua a temperatura entre 40 y 75 °C.

La presión de agua disponible antes de los filtros debe ser mínimo 15 psi. Si hay menor presión los filtros de agua deben ser de paso rápido, que disminuyen la presión muy ligeramente.

También se debe considerar un trabajo de plomería para el desagüe del equipo, la cual se hará al momento de la instalación.

La instalación requiere el mismo trabajo que instalar un lavamanos.

El equipo sólo pesa unos 25 Kg., pero con todos los aditamentos llega a pesar el embalaje de 35 a 40 Kg.